

Назальные канюли Inspiration Healthcare для высокопоточной вентиляции

Назальные канюли для высокопоточной вентиляции (HFNC)

Высокопоточные назальные канюли - это относительно новое устройство для респираторной поддержки.

Это абсолютно иной вид респираторной поддержки в сравнении с низкопоточными/малопоточными кислородными канюлями!


HFNC может создавать положительное давление и уменьшает работу дыхания, занимая позицию между классической масочной системой доставки кислорода и CPAP генераторами.

Показания:

- Детям с ГВ 34 недели и более как стартовая респираторная терапия и после экстубации;
- Детям с БЛД при потребности в CPAP;
- Эпизоды апноэ у детей без респираторной терапии;
- Детям при отлучении от CPAP (PEEP менее 4 см вод.столба)

Метод проведения:

- Скорость потока 2---4 л/мин детям менее 1000г
- Скорость потока 4---6 л/мин детям более 1000г
- Наружный диаметр носовых канюль должен быть не более 3/4 диаметра носового хода
- **Газовая смесь должна быть увлажнена и подогрета**

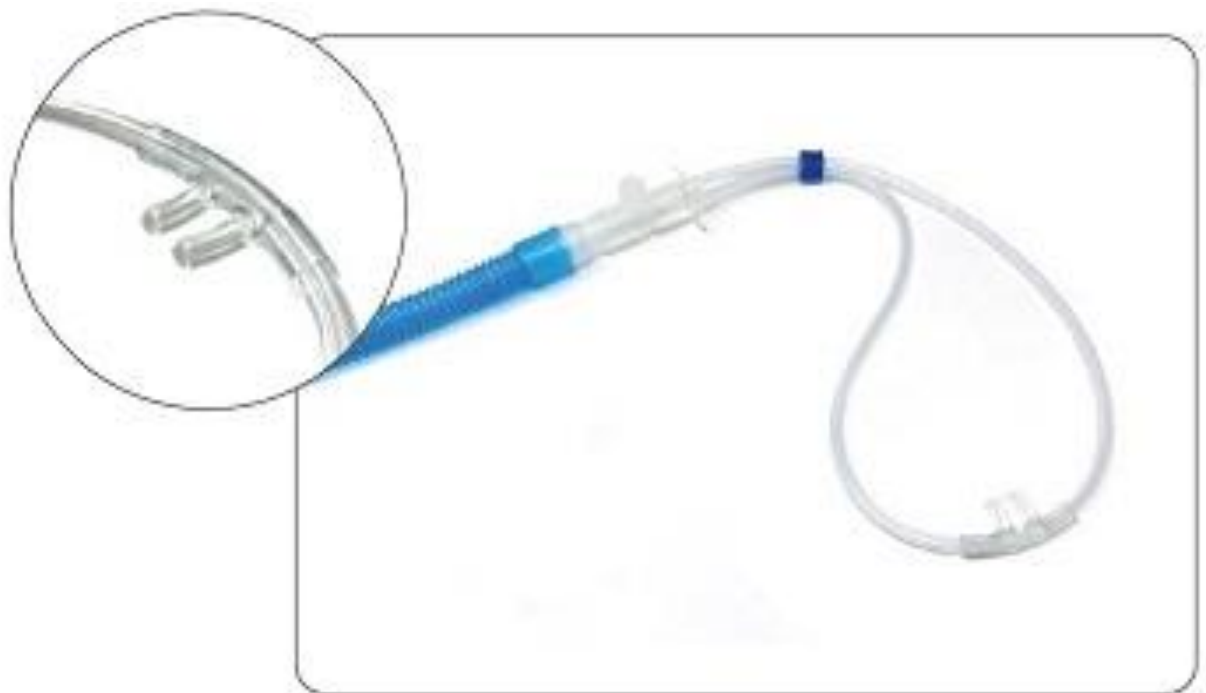

Назальные канюли высокого потока

СОВМЕСТИМОСТЬ



Обогреваемый контур




Кислородный адаптер

Система увлажнения



Увлажнитель с камерой

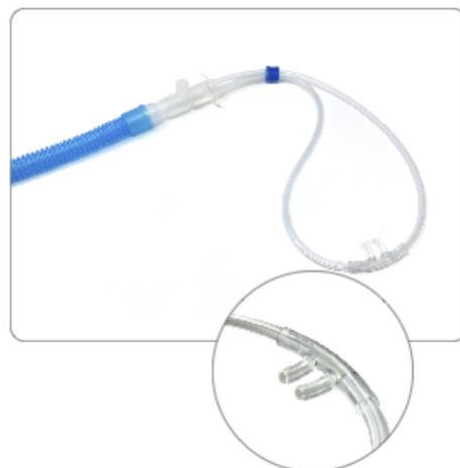

Назальные канюли высокого потока (HFNC)

Рабочие характеристики

Сопrotивление потоку	≤0.74 см.вод.ст./ л/мин@ 2.5 л/мин	Качество	Не содержит латекса	Сертификат CE
Утечка	≤30 мл/мин @ (60±3) см.вод.ст	Не содержит DEHP	Биосовместимый	
Комплаенс	≤1.5 мл/ см.вод.ст @ (60±3) см.вод.ст	Не содержит BPA	Сертификат ISO	
Длина контура	1,5 м	Одноразовый		
Внутренний диаметр трубки	12 мм	Клинически чистый		

Каталожные номера для заказа

Кат №	Размер	Цвет	OD канюли	Перегородка	Макс. поток	Кол-во
-------	--------	------	-----------	-------------	-------------	--------


ORDER CODES

REF	SIZE	PRONG OD	SEPTAL SPACE	MAX FLOW	COLOUR	QUANTITY
VX8110	Nasal Cannula Small	2.8mm	3.0mm	8 l/min	Clear	10
VX8111	Nasal Cannula Medium	2.8mm	4.7mm	8 l/min	Green	10
VX8112	Nasal Cannula Large	4.1mm	5.1mm	10 l/min	Blue	10
VX8113	Nasal Cannula Extra Large	4.7mm	5.8mm	10 l/min	Orange	10

Назальная канюля, высокопоточная с мягкими, слегка изогнутыми зубцами разработана для комфорта пациента.


- Гибкая конструкция обеспечивает максимальный комфорт пациента в положении лежа.
- Назальная канюля доступна в 4-х размерах разного цвета.
- Кислородный адаптер, поставляемый в комплекте, позволяет использовать канюли как при низкопоточной, так и высокопоточной подаче увлажненного кислорода.

Дыхательный контур для использования с высокопоточной назальной канюлей для стандартного вентилятора

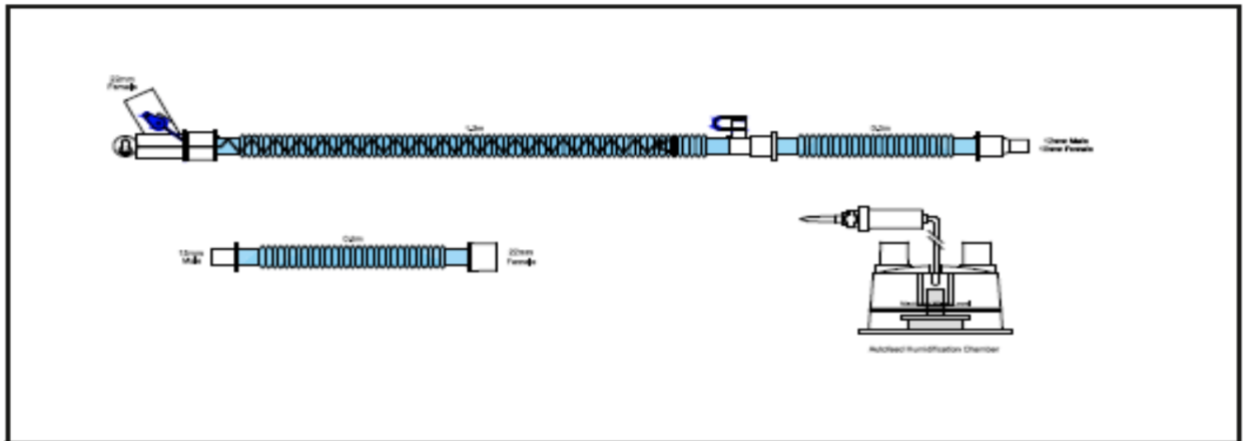

Кат №	ОПИСАНИЕ	Кол-во
C4300	Неонатальный дыхательный контур с обогревом в линии вдоха для использования с высокопоточной назальной канюлей	20
C4331	Неонатальный дыхательный контур с обогревом в линии вдоха для использования с высокопоточной назальной канюлей с увлажнительной камерой	10

Дыхательный контур для использования с высокопоточной назальной канюлей для вентилятора Fabian

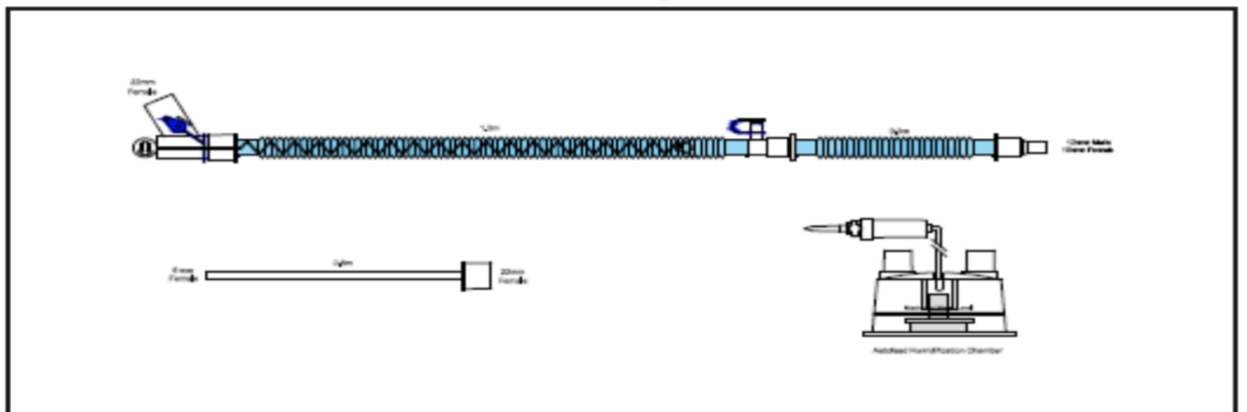

Кат №	ОПИСАНИЕ	Кол-во
C4335	Неонатальный дыхательный контур с обогревом в линии вдоха для использования с высокопоточной назальной канюлей с соединительной трубкой для Fabian	20
C4336	Неонатальный дыхательный контур с обогревом в линии вдоха для использования с высокопоточной назальной канюлей с соединительной трубкой для Fabian и с увлажнительной камерой	10